

Краткое руководство по запуску программы Ez3D-i & Lite Simple Viewer




Как открыть исследование в программе Ez3D-i Simple Viewer

Запуск программы


Порядок запуска программы зависит от способа, которым были получены клинические данные:

- CD/DVD-диск.
Если вам прислали CD/DVD-диск, то при установке диска в компьютер появится окно автозапуска.

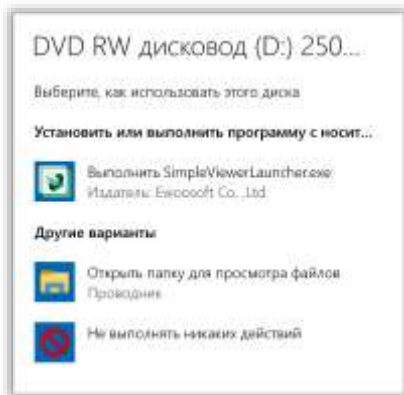

Выполните запуск “SimpleViewerLauncher.exe” и перейдите к разделу “Выбор программы просмотра”.

- USB-носитель / Интернет.
При открытии с USB или другого внешнего накопителя просто перейдите к обзору файлов, как показано ниже.
При загрузке через интернет, убедитесь в том, что набор данных сохранен локально, архив распакован.

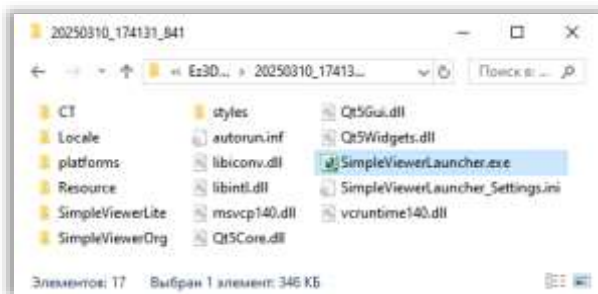

Выполните запуск “SimpleViewerLauncher.exe” и перейдите к разделу “Выбор программы просмотра”.

Выбор программы просмотра

При запуске программы, появляется следующая форма.



- Кнопка “Simple Viewer” запускает программу просмотра изображений вместе с проектом в том виде, в котором они были доступны в настольной версии программы Ez3D-i.
Для корректной работы требует наличия графического процессора NVIDIA.
Программа не требует установки на компьютере.




- Кнопка “Simple Viewer Lite” открывает программу Ez3D Plus для систем, не требующих высокой производительности. Если соответствующая версия Ez3D Plus уже установлена, программа откроется в обычном режиме.



Установка программы Ez3D Plus.

- При выборе “Simple Viewer Lite” для просмотра изображений в программе Ez3D Plus, будет предложено выполнить установку программы. Нажмите “Далее”, чтобы продолжить.

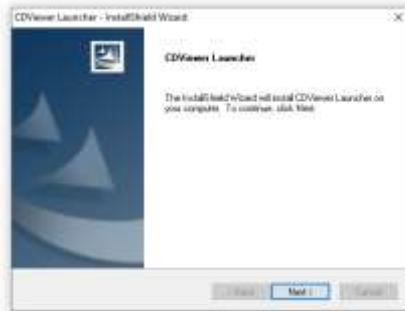

- Нажмите “Да”, чтобы начать установку.




- Если в вашей системе обнаружена предыдущая версия программы, нажмите “Да”, чтобы выполнить обновление.



- Нажмите "Установить", чтобы продолжить.




- Теперь установка будет выполняться в обычном режиме, не закрывайте окна во время этого процесса.

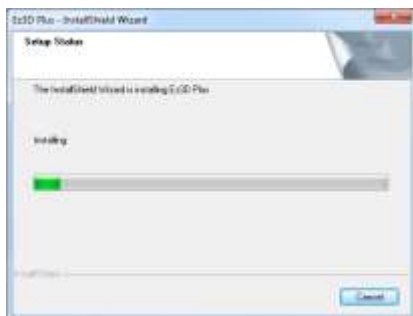

- Когда установка закончится, просто нажмите кнопку Готово.



- Программа Ez3D Plus Simple viewer запустится автоматически. Если этого не произойдет, просто перезапустите программу с первых шагов, чтобы начать процесс установки заново.

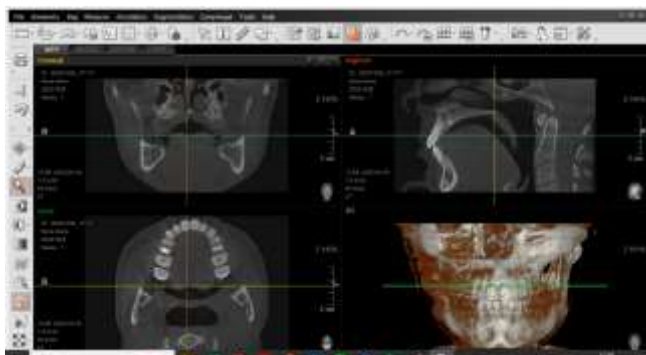

Электронная версия документа доступна по ссылке:



Если у вас возникли сложности с запуском программы, рекомендуем ознакомиться с видеоинструкцией:

